



株式会社森田スチール本舗

スチール®脱腸帯

双頭

— サイズ調節方法 —

〒170-0003 東京都豊島区駒込 2-8-6

TEL : 03-3910-3591 FAX : 03-3910-3403



初めはこの状態です(一番小さいサイズに合わせてあります)



先に6ヶ穴の開いた皮側(以後ベロ皮と呼ぶ)から外します



ベロ皮の根元の穴にはまっているダボ(金具)から外します



ベロ皮を背当(左右のバネを繋ぐ部品)から引き抜きます



同じようにダボ側を背当から引き抜きます



背当からベロ皮、ダボ側が完全に外れた状態です



ご自身のサイズに合った背当の穴の位置へダボ側から差し込む




ダボ側を背当の穴の奥まで差し込みます



次にベロ皮をご自身のサイズに合った背当の穴へ差し込む



こちらも背当の穴の奥まで差し込みます

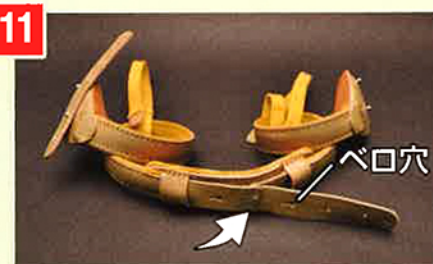

ベロ穴へダボを止めます(サイズがひとつ大きくなりました)



最後に先の輪へベロ皮を通せばサイズ調節は完了です